

Holding Pipette

میکروپیپت هلدینگ

کاربرد

جهت نگه داشتن تخمک در حین تزریق اسپرم به درون سیتوپلاسم تخمک طی فرآیند تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم استفاده میشود.

ویژگی ها

- دارای قطرهای متفاوت با توجه به نیاز کاربر.
- ویژگی های ظاهری همه ی پیپت ها از نظر قطر و زاویه بررسی میشوند.

تست های کنترل کیفیت

- تست موس امبریو اسی $\leq 85\%$
- اندوتوکسین
- استریلیتی
- حساسیت زایی
- سیتوتوکسیسیتی

نحوه ی استریل:

محصول به صورت پرتودهی استریل میشود.

طول عمر محصول:

3 سال پس از تاریخ تولید

شرایط نگه داری محصول:

در جای خشک و خنک (۱۵-۲۵ درجه سانتی گراد) .



نحوه کاربری محصول:

- ۱- بسته بندی استریل محصول را باز کرده.
- ۲- ظرف پلاستیکی حاوی پپیت به صورت کشویی و به آهستگی باز کرده.
- ۳- پپیت را به آهستگی و بدون فشار انگشت دست برداشته و در بازوی خاص پپیت بر روی دستگاه میکرومنیپولاتور قرار داده.
- ۴- فرآیند اینجکت اسپرم به داخل تخمک توسط جنین شناس آموزش دیده و مجرب انجام میشود. در این مرحله میکروپپیت هلدینگ را به آرامی به تخمک نزدیک کرده و در محل مناسب تعبیه کرده و فرآیند انتقال آغاز میشود.
- ۵- خارج کردن میکروپپیت از محل تعبیه شده روی دستگاه میکرو منیپولاتور و دفع آن.

محدودیت و منع استفاده:

- محصول شکننده میباشد در حین کار با احتیاط برخورد شود.
- در صورت آسیب به بسته بندی استریل از استفاده آن خودداری فرمائید.
- محصول یکبار مصرف میباشد و از استفاده مجدد آن خودداری فرمائید.

Glossary of symbols:	
	شماره کاتالوک
	شماره سری ساخت
	استریل شده با اشعه گاما
	تاریخ تولید
	تاریخ انقضا
	هشدار، راهنمای محصول مطالعه شود
	دمای نگهداری و انبارش
	محل تولید
	دوبار استفاده نشود
	دور از نور خورشید نگهداری شود